

# フェイスシールド（フェイス透明カバー着脱式）取扱説明書

《実用新案登録・意匠登録出願中》

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この説明書をお読みの上、正しくお使いください。


特に、お子様のご使用にあたっては、保護者の方がよくご説明してください。

製品のご使用中に、かゆみ・かぶれ・湿疹などの異常が生じた場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。

## 【セット内容】


- フェイスシールド本体（PP） 1ヶ
- フェイス透明カバー（PVC） 1ヶ
- フェイスシールド留めゴム（EPDM） 1ヶ

- ①フェイス透明カバーを本体の4つの突起に端から順番に取り付ける。本体の上下はどちらでも問題ありません。  
（本体は上下左右対称のユニバーサルデザイン仕様）

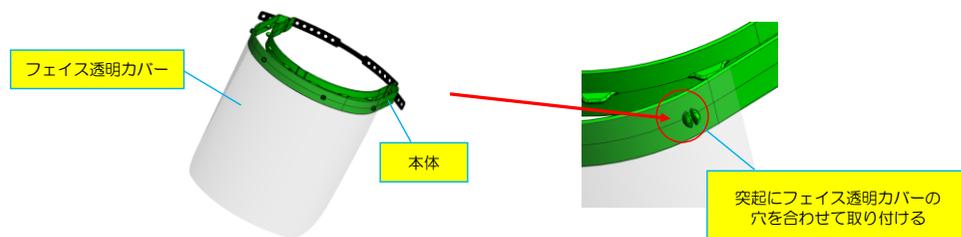


※ご注意  
フェイス透明カバーの穴部に、抜き形状がある場合がありますが、取り付けの際、簡単に取れます。取れたものは廃棄をお願いいたします。

《代替品として市販文具A4透明プリンター用紙（OHP）》  
穴開けパンチで端から60mmを中心にして穴を開け、本体に取り付ける。

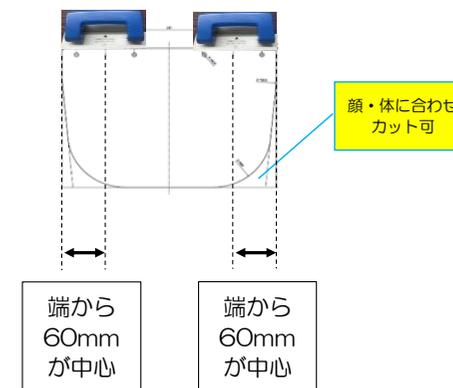

- ②フェイスシールド留めゴムを装着する。  
（留めゴムの穴を調整し、フェイスシールドの装着を安定させる）

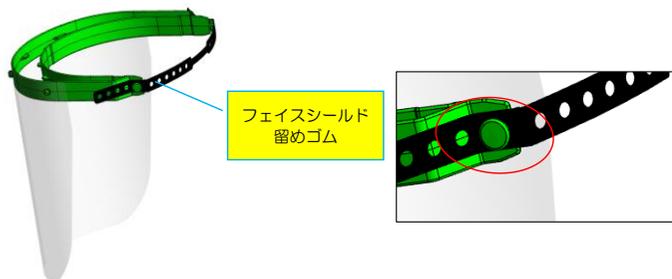

《代替品として市販輪ゴム#16（径60mm）3つ》  
3つを繋ぎ合わせ、本体に取り付ける。

《留めゴム調整方法》



## 《メンテナンス方法》

汚れ付着等気になった際は、以下の手順に沿ってメンテナンスを実施してください。

- ①本体からフェイス透明カバー、フェイスシールド留めゴムを取り外してください。
- ②本体、カバー、留めゴムを中性洗剤等（薄めた次亜塩素酸水も可）で丁寧に洗い、冷水（40℃以下）で十分に流してください。
- ③柔らかい布等で優しく拭き取り、取扱説明書に沿って取り付けてください。

## ※使用上の注意事項

- 安全のため、破損・変形した本体、カバー、留めゴムは 使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所で放置しないでください。
- 小さなお子さまがいらっしゃる場合は、誤飲等十分にご注意ください。

## 【販売元】

〒238-0014  
神奈川県横須賀市三春町  
岡田電機工業株式会社  
e-mail : sales@okada-ind.jp  
HP : www.okada-ind.jp